

# GREEN&CLEAN

## DISINFEZIONE - IGIENE - PULIZIA

Mani

Superfici

Aree Speciali

Strumenti



Sicuro

Pulito

Efficiente

I microorganismi fanno parte della nostra vita quotidiana. In genere, non prestiamo grande attenzione al rischio di infezione. Negli ambulatori medici è diverso. Il rischio di infezione è molto più grande. Il gran numero di pazienti trattati e la natura del lavoro esigono di conseguenza un'accurata igiene. La responsabilità del medico nei confronti di se stesso e del proprio personale esige l'uso di prodotti disinfettanti ad alta efficacia.

Con i nostri prodotti GREEN&CLEAN offriamo una vasta gamma di soluzioni per tutti i requisiti di igiene e le relative direttive. Sostanze attive e prodotti di cura avanzati garantiscono una sicurezza e una protezione assoluta contro le infezioni.

GREEN&CLEAN assicura un'igiene perfetta nell'intero studio odontoiatrico!

## GREEN&CLEAN HD N GREEN&CLEAN HL | GREEN&CLEAN HC



GREEN&CLEAN HL - Lozione antisettica, detergente e curativa per le mani

GREEN&CLEAN HD N - Disinfettante per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani e degli avambracci

GREEN&CLEAN HC - Crema nutritiva per le mani

## GREEN&CLEAN WD


Disinfezione a base d'alcool per piccole superfici, come manipoli e contrangoli


## GREEN&CLEAN IK

Disinfezione di condotte di acqua ed aria nebulizzate di manipoli, contrangoli e turbine

## GREEN&CLEAN ID N

Pulizia preparatoria disinfettante di strumenti invasivi e non invasivi

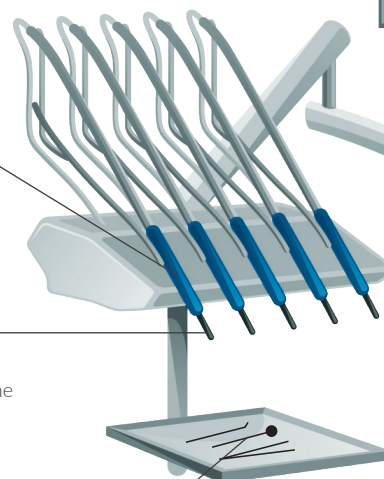

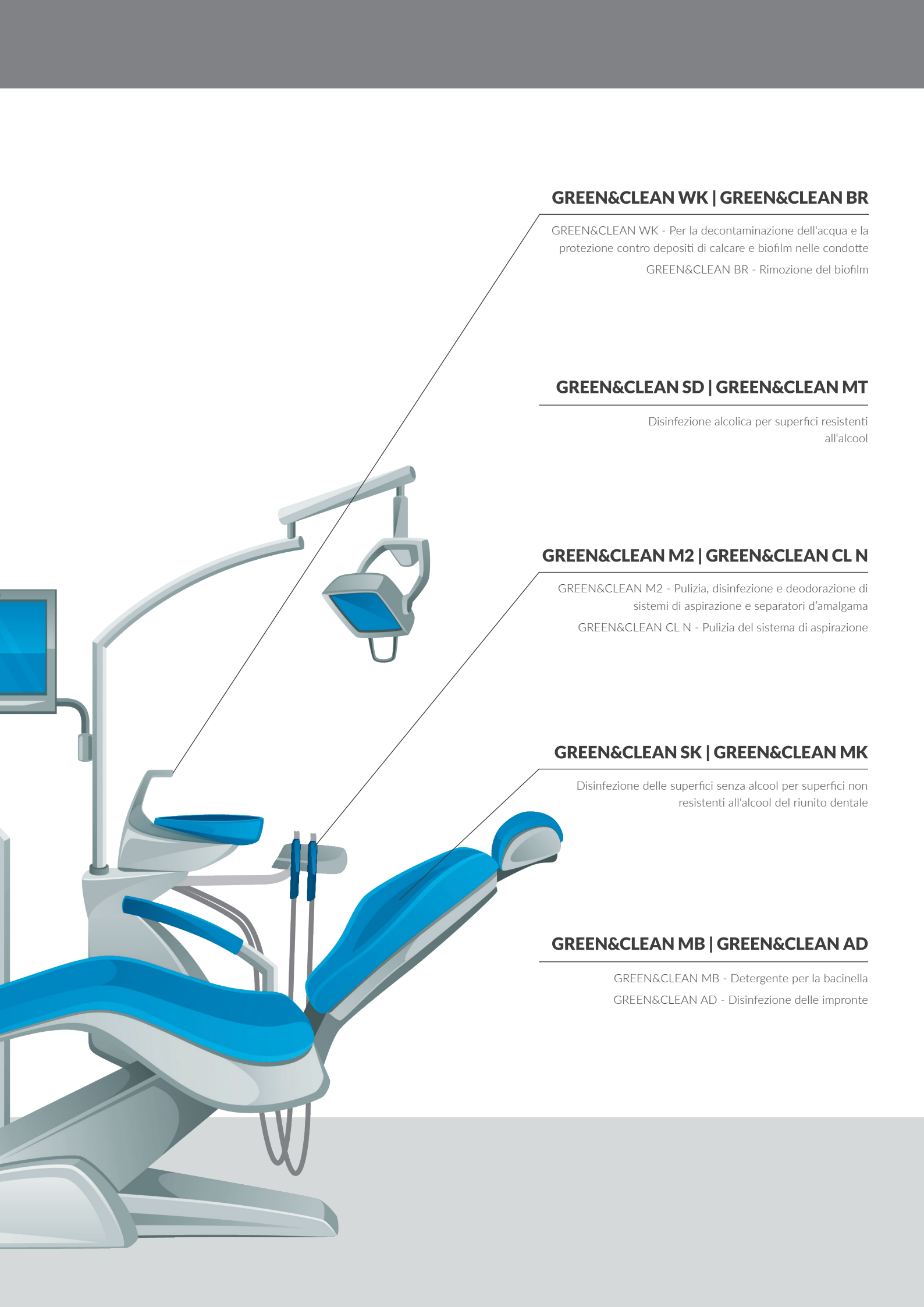

### **GREEN&CLEAN WK | GREEN&CLEAN BR**

GREEN&CLEAN WK - Per la decontaminazione dell'acqua e la protezione contro depositi di calcare e biofilm nelle condotte  
GREEN&CLEAN BR - Rimozione del biofilm

### **GREEN&CLEAN SD | GREEN&CLEAN MT**

Disinfezione alcolica per superfici resistenti all'alcool

### **GREEN&CLEAN M2 | GREEN&CLEAN CL N**

GREEN&CLEAN M2 - Pulizia, disinfezione e deodorazione di sistemi di aspirazione e separatori d'amalgama  
GREEN&CLEAN CL N - Pulizia del sistema di aspirazione

### **GREEN&CLEAN SK | GREEN&CLEAN MK**

Disinfezione delle superfici senza alcool per superfici non resistenti all'alcool del riunito dentale

### **GREEN&CLEAN MB | GREEN&CLEAN AD**

GREEN&CLEAN MB - Detergente per la bacinella  
GREEN&CLEAN AD - Disinfezione delle impronte

Preparato curativo per la disinfezione igienica delle mani e la disinfezione chirurgica delle mani e degli avambracci

- > alcool di ottima qualità impedisce l'inacidimento della pelle
- > mantiene il pH naturale della pelle
- > piacevole profumo di pino
- > contenuto negli elenchi VAH

**Adempie alle norme EN:**

- > EN 1500 disinfezione igienica delle mani
- > EN 12791 disinfezione chirurgica delle mani
- > EN 14476 efficacia virucida
- > EN 14348 efficacia myco-battericida

**Combinazione di principi attivi avanzati**

propanolo-1-ol, etanolo-1

**Spettro d'azione**

battericida, fungicida (C. albicans), tubercolicida, completamente virucida

**Tempi d'azione**

Disinfezione igienica

Frizionare le mani 30 sec. con 3ml di GREEN&CLEAN HD N

Disinfezione chirurgica

Frizionare mani ed avambracci 1,5 min. con 10ml di GREEN&CLEAN HD N

**Codici d'ordine**

122000009 GREEN&CLEAN HD N, 6x flaconi Euro 1000ml

122000010 GREEN&CLEAN HD N, 6x flaconi Euro 500ml

\*Usare GREEN&CLEAN HD N con cautela. Leggere attentamente sull'etichetta le avvertenze del prodotto.



## DOSATORI

Dosatori per disinfettante e sapone per le mani



**META TOUCHLESS**

- > dosatore a sensore per flaconi di 500ml
- > dosaggio: 1,5ml per dosatura
- > posizionamento flessibile: dosatore da tavola o da muro
- > vaschetta anti-gocce da smontare

**Codice d'ordine**

121000019 META TOUCHLESS

dosatore per flaconi 500ml



**META TOUCH**

- > dosatore muro per flaconi Euro da 1000ml
- > autoclavabile e da usare con lavastoviglia fino a 134°C
- > dosatura da aggiustare a 0,75ml / 1,0ml / 1,5ml
- > supporto in alluminio
- > cambio pompa dal davanti

**Codice d'ordine**

121000018 META TOUCH

dosatore muro per flaconi da 1000ml



## GREEN & CLEAN HL

PULIZIA IGIENICA DELLE MANI

Lozione detergente curativa per le mani con ampia azione antisettica

- > ampia azione antisettica
- > senza alcali, pH neutro
- > protegge il naturale grado di acidità della pelle
- > previene le irritazioni della pelle
- > sostanza curativa: allantoina



### Codici d'ordine

122000013	1x flacone Euro da 1000ml	122000014	1x tanica da 5l
122000011	5x flaconi da 750ml + dosatore	121000001	Rubinetto per tanica 5l
122000012	6x flaconi da 750ml		

## GREEN & CLEAN HC

CURA DELLE MANI

Crema nutritiva per le mani a base di burro di karitè, ectoina e allantoina

- > adatta per pelli sensibili
- > cura, idrata e nutre la pelle; rilassa e distende la pelle
- > previene screpolature della pelle
- > si assorbe velocemente



### Codici d'ordine

122000066	1x tubetto con 100ml
122000007	6x tubetti con 100ml





# SUPERFICI

## DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

Dopo aver trattato il paziente, è necessario disinfettare e pulire tutte le superfici contaminate, sia per contatto sia per nebulizzazione, vicino alle quali si trovava il paziente. In caso di nebulizzazione occorre osservare un raggio di espansione di 2 metri. Bisogna disinfettare immediatamente anche tutte le superfici lontane dal paziente che sono state visibilmente contaminate.

Una volta al giorno è necessario trattare con un disinfettante per superfici tutte le superfici dello studio usate a fini clinici. Per ragioni legate alla sicurezza del lavoro è preferibile generalmente disinfettare strofinando piuttosto che polverizzando.



# GREEN & CLEAN SK

## DISINFEZIONE A NEBULIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Disinfezione senza alcool a nebulizzazione per superfici non resistenti all'alcool di prodotti medicali

- > senza alcool
- > tempi d'azione brevi
- > soluzione disinfettante pronta all'uso
- > particolarmente adatta per le superfici sensibili all'alcool di dispositivi medici
- > priva di aldeidi, fenoli e fosfati

> CE 0044



### Combinazione di principi attivi avanzati

Composti d'ammonio quaternario

Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione
battericida	EN 13727	basso carico	1 min
levuricida	EN 13624	basso carico	1 min
test delle 4 aree (battericida, levuricida)	EN 16615	basso carico	5 min
limitatamente virucida	EN 14476 EN 16777	basso carico	1 min

### Codici d'ordine GREEN&CLEAN SK

- 122000064 1x flacone da 750ml con spruzzatore schiumogeno
- 122000050 6x flaconi da 750ml con 2x spruzzatori schiumogeno
- 122000051 1x tanica da 5l
- 121000001 Rubinetto per tanica 5l

# GREEN & CLEAN MK

## DISINFEZIONE A STROFINAMENTO PER GRANDI SUPERFICI

Teli disinfettanti per strofinamento senza alcool per superfici non resistenti all'alcool di prodotti medicali

- > Panni extralarge (290 x 270mm), per l'utilizzo con il GREEN&CLEAN SK, per la disinfezione a strofinamento di grandi superfici di prodotti medicali

### Codici d'ordine GREEN&CLEAN MK

- 122000040 1x secchiello 70 teli + 5x rotoli à 70 teli  
1x tanica GREEN&CLEAN SK 5l
- 122000042 2x rotoli à 70 teli
- 122000043 1x secchiello 70 teli + 5x rotoli à 70 teli



**GREEN  
&CLEAN**

# SD

DISINFEZIONE A NEBULIZZAZIONE PER GRANDI SUPERFICI

Disinfezione alcolica a nebulizzazione per superfici resistenti all'alcool di prodotti medicali

- > tempi d'azione brevi
  - > soluzione disinfettante pronta all'uso
  - > senza formaldeide
- > CE 0044

#### Combinazione di principi attivi avanzati

etanolo, 2-propanolo, composti quaternari d'ammonio, glicosale



Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione
battericida	EN 13727	alto carico	15 s
levuricida	EN 13624	alto carico	15 s
tuberculicida	EN 14348	alto carico	1 min
test delle 4 aree (battericida, levuricida)	EN 16615	alto carico	1 min
limitatamente virucida	EN 14476 EN 16777	basso carico	1 min

#### Codici d'ordine GREEN&CLEAN SD

- 122000047 5x flaconi da 750ml con 2x spruzzatori
- 122000045 6x flaconi da 750ml
- 122000048 1x tanica da 5l
- 122000046 2x flaconi da 750ml + 1x spruzzatore
- 121000001 Rubinetto per tanica 5l

**GREEN  
&CLEAN**

# MT

DISINFEZIONE ALCOLICA A STROFINAMENTO PER GRANDI SUPERFICI

Disinfezione alcolica a strofinamento per superfici resistenti all'alcool di prodotti medicali

- > Panni extralarge (290 x 270mm), per l'utilizzo con il GREEN&CLEAN SD, per la disinfezione a strofinamento di grandi superfici di prodotti medicali

#### Codici d'ordine GREEN&CLEAN MT

- 122000044 1x secchiello 70 teli + 5x rotoli à 70 teli  
1x tanica GREEN&CLEAN SD 5l
- 122000042 2x rotoli à 70 teli
- 122000043 1x secchiello 70 teli + 5x rotoli à 70 teli





Salviette disinfettanti a base d'alcool in tessuto antistrappo per la disinfezione di piccole superfici di dispositivi medici (per es. contrangoli, manipoli, turbine)

- > tempi d'azione brevi
  - > senza formaldeide
  - > con chiusura igienica di sicurezza
- > CE 0044

**Combinazione di principi attivi avanzati**

etanolo, 2-propanolo, composti quaternari d'ammonio, glossale



Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione
battericida	EN 13727	alto carico	30 s
levuricida	EN 13624	alto carico	30 s
tuberculicida	EN 14348	alto carico	30 s
test delle 4 aree (battericida, levuricida)	EN 16615	alto carico	1 min
limitatamente virucida	EN 14476 EN 16777	alto carico	30 s

**Codici d'ordine**

- 122000052 1x barattolo da 120 salviette
- 122000053 6x buste da 120 salviette
- 122000055 1x barattolo da 120 salviette + 3x buste da 120 salviette
- 121000012 1x barattolo GREEN&CLEAN WD vuoto



**GREEN  
&CLEAN**

# M2

DISINFEZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Concentrato duale, antischiumogeno per la pulizia, la disinfezione e la deodorazione quotidiana del sistema di aspirazione e dei separatori d'amalgama

- > sistema duale (rosso/verde)
- > ottimamente antischiumogeno
- > di facile utilizzo grazie al pratico dosatore
- > prodotto enzimatico con eccellente scioglibilità delle proteine
- > ideale per tutti i separatori d'amalgama ed aria/acqua
- > CE 0044



### Combinazione di principi attivi avanzati

Alchilamina, composti d'ammonio quaternario, enzimi

GREEN&CLEAN M2 verde   Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione	Soluzione
battericida	EN 13727	alto carico	10 min	soluzione al 1%
levuricida	EN 13624	alto carico	10 min	soluzione al 1%
tuberculicida	EN 14348	alto carico	240 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - battericida	EN 14561	alto carico	15 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - levuricida	EN 14562	alto carico	15 min	soluzione al 1%
limitatamente virucida	EN 14476	alto carico	60 min	soluzione al 1%

GREEN&CLEAN M2 rosso   Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione	Soluzione
battericida	EN 13727	alto carico	10 min	soluzione al 1%
levuricida	EN 13624	alto carico	10 min	soluzione al 1%
tuberculicida	EN 14348	alto carico	240 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - battericida	EN 14561	alto carico	15 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - levuricida	EN 14562	alto carico	15 min	soluzione al 1%
limitatamente virucida	EN 14476	alto carico	60 min	soluzione al 1%

### Codici d'ordine

122000026	2x flaconi da 500ml (1x rosso, 1x verde) + dosatore
122000027	4x flaconi da 500ml (2x rosso, 2x verde)
122000028	2x flaconi da 500ml (1x rosso, 1x verde)
122000031	GREEN&CLEAN M2 rosso, 25x flaconi da 500ml
122000030	GREEN&CLEAN M2 verde, 25x flaconi da 500ml
121000009	Dosatore per GREEN&CLEAN M2



# SEMPLICE - EFFICIENTE - UNICO

Disinfezione e pulizia del sistema di aspirazione con GREEN&CLEAN M2

- > Efficiente: Ampio spettro d'azione e alta forza pulente garantiscono un'igiene profonda
- > Semplice: Di facile e veloce utilizzo grazie al pratico dosatore
- > Unico: La combinazione di colore come espressione visiva di principi attivi differenti per una disinfezione sicura a lungo termine





# AREE SPECIALI

GREEN  
& CLEAN

# CLN

PULIZIA DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Concentrato per la pulizia quotidiana del sistema di aspirazione

- > efficacia antischiumogena elevata grazie a principi attivi di ultima generazione
- > eccellente potere solubile proteico grazie alla speciale miscela enzimatica
- > piacevole fragranza dentro lo studio
- > semplice dosaggio grazie al flacone Double-Neck
- > pH-neutrale
- > CE

Combinazione di principi attivi avanzati  
acido carbonico alkyl etero, subtilisina

Codici d'ordine

12200004 2x flaconi da 1000ml

12100005 Contenitore miscelatore per GREEN&CLEAN CLN



# GREEN & CLEAN AD

## DISINFEZIONE DELLE IMPRONTE

Soluzione pronta all'uso per la disinfezione profonda ad immersione di tutti i lavori protesici, di protesi dentistiche ed impronte

- > tempo d'azione breve
- > utilizzabile per alginati, siliconi, polieteri e polisolfuri
- > ottima compatibilità con i materiali
- > priva di formaldeide e di fenoli
- > durata della soluzione: 1 settimana
- > CE 0044

### Combinazione di principi attivi avanzati

Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, tensioattivi

Sostanza attiva	germe di prova	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione
battericida	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 13727	alto carico <sup>1</sup>	2 min
levuricida	C. albicans	EN 13624	alto carico <sup>1</sup>	2 min
test portatore di germi - battericida	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 14561	alto carico <sup>1</sup>	5 min
test portatore di germi - levuricida	C. albicans	EN 14562	alto carico <sup>1</sup>	5 min
limitatamente virucida	Vacciniavirus	EN 14476	basso carico <sup>2</sup>	15 sec
		EN 16777	basso carico <sup>2</sup>	1 min

<sup>1</sup> albumina di siero bovino 3g/l + eritrociti di pecora 3ml/l

<sup>2</sup> albumina di siero bovino 3g/l + eritrociti di pecora 3ml/l

### Codici d'ordine

- 122000001 1x tanica da 5l
- 121000003 Vaschetta di disinfezione 1,25l con coperchio e cestello
- 121000001 Rubinetto per tanica 5l



# GREEN & CLEAN MB

## PULIZIA DELLA BACINELLA

Detergente con spazzola a base di acido citrico ed enzimi per la pulizia della bacinella

- > eccezionale dissoluzione delle proteine grazie alla componente enzimatica
- > con effetto antischiumogeno
- > CE

### Combinazione di principi attivi avanzati

Composti d'ammonio quaternario, tensioattivi, enzimi

### Codici d'ordine

- 122000035 1x flacone da 180ml con spazzola
- 122000032 2x flaconi da 500ml + 2x flaconi + 2x spazzole
- 122000033 4x flaconi da 500ml + 4x spazzole
- 122000034 4x flaconi da 500ml
- 122000037 4x spazzole
- 122000036 1x flacone vuoto con spazzola



# AREE SPECIALI

GREEN  
& CLEAN

## BR

RIMOZIONE DEL BIOFILM

Soluzione al 4% per la rimozione del biofilm dalle condotte idriche di riuniti dentali con il dispositivo di pulizia BR o attraverso sistemi a bottiglia

- > eliminazione efficace del biofilm in soli 30 minuti
- > è consigliato la pulizia prima dell'installazione di sistemi di decontaminazione
- > uso semplice grazie alla soluzione colorata
- > CE 0044

### Sostanza attiva

perossido d'idrogeno

### Codice d'ordine

122000002 Soluzione GREEN&CLEAN BR, 2x flaconi da 1000ml



GREEN  
& CLEAN

## H1

DETERGENTE PER IL SISTEMA D'IGIENE H1

Concentrato decontaminante per il sistema d'igiene automatico METASYS H1

- > per la pulizia continua del sistema di aspirazione
- > antischiumogeno
- > CE

### Combinazione di principi attivi avanzati

Composti d'ammonio quaternario, tensioattivi speciali, enzimi

### Codice d'ordine

122000005 4x buste da 500ml



METASAN® P

DECONTAMINAZIONE DELL'ACQUA

Soluzione all'1,41% a base di perossido d'idrogeno per la decontaminazione dell'acqua nelle condotte idriche di riuniti dentali Dentsply Sirona

- > decontaminazione continua dell'acqua nelle condotte idriche
- > rispettoso dei materiali
- > vasto spettro d'azione
- > CE 0044

### Sostanza attiva

perossido d'idrogeno

### Codici d'ordine

122000059 6x flaconi da 1000ml





**GREEN  
&CLEAN**

# WK

DECONTAMINAZIONE DELL'ACQUA

Soluzione al 2% a base di perossido d'idrogeno per la decontaminazione e per la prevenzione di depositi di calcare nelle condotte idriche del riunito dentale

- > vasto spettro d'azione
- > evita la deposizione di calcare
- > adatto anche per sistemi a bottiglia
- > CE 0044

**Sostanza attiva**  
perossido d'idrogeno

### GREEN&CLEAN WK indicatori perossido

- > Indicatori per controllo visivo della funzionalità e l'efficacia di decontaminatori idrici
- > La gamma di colori dell'indicatore indica la concentrazione del GREEN&CLEAN WK nell'acqua al riunito

### Kit dosaggio per bottiglie riunito

- > utilizzabile per GREEN&CLEAN WK, flacone da 750ml

### Codici d'ordine

122000057	4x flaconi da 750ml	121000016	WK indicatori, 5 pezzi
122000056	6x flaconi da 1000ml	121000014	Kit dosaggio per bottiglie riunito (per flacone da 750 ml)
121000015	WK indicatori, 25 pezzi		



**GREEN  
& CLEAN**

**IK**

## DISINFEZIONE DI MANIPOLI E CONTRANGOLI

Spray disinfettante pronto all'uso a base d'alcool per condotte di acqua ed aria nebulizzate di manipoli, contrangoli e turbine

- > tempo d'azione breve
- > maggiore sicurezza di utilizzo grazie agli adattatori fissi
- > una bomboletta spray serve per ca. 300 applicazioni (premere per 2 secondi ogni volta)
- > un'adattatore universale per tutti i manipoli / contrangoli e adattatori specifici per le più comuni turbine
- > non sostituisce la lubrificazione raccomandata dal produttore!
- > CE 0044



### Combinazione di principi attivi avanzati

1-propanolo, 2-propanolo, 2-butanolo, composti d'ammonio quaternario

Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione
battericida	EN 13727	alto carico	1 min
levuricida	EN 13624	alto carico	1 min
levuricida	EN 14348	alto carico	1 min
test portatore di germi - battericida	EN 14561	alto carico	2 min
test portatore di germi - levuricida	EN 14562	alto carico	1 min
test portatore di germi - tubercolicida	EN14563	alto carico	1 min
limitatamente virucida	EN 14476 EN 16777	alto carico	30 s

### Codici d'ordine

2x 200ml bombolette spray con adattatore fisso premontato:

- 122000017 Contrangoli e manipoli (universale)
- 122000025 Attacco rapido turbine W&H
- 122000021 Attacco rapido turbine Bien Air
- 122000023 Attacco rapido turbine KaVo
- 122000024 Attacco rapido turbine Dentsply Sirona
- 122000022 Attacco rapido turbine Castellini
- 122000018 Attacco rapido turbine NSK
- 122000020 Contrangoli e manipoli Dentsply Sirona T1 Classic
- 122000019 Attacco rapido turbine NSK Quick





GREEN  
& CLEAN

# ID N

DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI

Concentrato la pulizia disinfettante preventiva di strumenti odontoiatrici invasivi e non

- > 5l di concentrato diluiti al 1% producono 500l di soluzione pronta all'uso
- > privo di aldeidi e fenoli
- > contenuto negli elenchi VAH
- > durata della soluzione: 14 giorni
- > CE 0044



## Combinazione di principi attivi avanzati

Composti d'ammonio quaternario, alchilamina, inibitori di corrosione

Spettro d'azione	Norme	Informazioni sui test	Tempo d'azione	soluzione
battericida	EN 13727	alto carico	5 min	soluzione al 0,5%
levuricida	EN 13624	alto carico	5 min	soluzione al 1%
tuberculicida	EN 14348	alto carico	60 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - battericida	EN 14561	alto carico	15 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - levuricida	EN 14562	alto carico	15 min	soluzione al 1%
test portatore di germi - tuberculicida	EN 14563	alto carico	60 min	soluzione al 0,5%
limitatamente virucida	EN 14476	basso carico	15 min	soluzione al 0,5%

## Codici d'ordine

122000015	4x flaconi da 500 ml + dosatore	121000007	Dosatore per GREEN&CLEAN ID N
122000016	1x tanica da 5l	121000001	Rubinetto per tanica 5l



# GREEN&CLEAN



## MANI

Pulizia      Disinfezione      alcolica      pronto all'uso

GREEN&CLEAN HL	Pulizia igienica mani	■			■
GREEN&CLEAN HD N	Disinfezione mani		■	■	■
GREEN&CLEAN HC	Cura mani				■

## SUPERFICI

GREEN&CLEAN SK	Disinfezione a nebulizzazione	■	■		■
GREEN&CLEAN MK	Disinfezione a strofinamento	■	■		
GREEN&CLEAN WD	Disinfezione a strofinamento	■	■	■	■
GREEN&CLEAN SD	Disinfezione a nebulizzazione	■	■	■	■
GREEN&CLEAN MT	Disinfezione a strofinamento	■	■	■	

## AREE SPECIALI

GREEN&CLEAN M2 verde	Disinfezione del sistema di aspirazione	■	■		
GREEN&CLEAN M2 rosso	Disinfezione del sistema di aspirazione	■	■		
GREEN&CLEAN H1	Pulente per H1	■			■
GREEN&CLEAN CL N	Pulizia del sistema di aspirazione	■			
GREEN&CLEAN MB	Pulizia della bacinella	■			■
GREEN&CLEAN WK	Decontaminazione e prevenzione Biofilm		■		
METASAN® P	Decontaminazione e prevenzione Biofilm		■		■
GREEN&CLEAN BR	Rimozione del Biofilm	■	■		■
GREEN&CLEAN AD	Disinfezione delle impronte	■	■		■

## STRUMENTI

GREEN&CLEAN IK	Disinfezione di manipoli, contrangoli e turbine	■	■	■	■
GREEN&CLEAN ID N	Disinfezione degli strumenti	■	■		



Testato secondo seguenti norme EN:

EN 13623 EN 13624 EN 13727 EN 14348 EN 14476 EN 14561 EN 14562 EN 14563 EN 16615 EN 16777 Disponibile come:

											750 ml, 1000 ml, 5000 ml
											500 ml, 1000 ml
											100 ml
	■	■		■					■	■	750 ml, 5000 ml
											70 salviette
	■	■	■	■					■	■	120 salviette
	■	■	■	■					■	■	750 ml, 5000 ml
											70 salviette
	■	■	■	■	■	■					500 ml
	■	■	■	■	■	■					500 ml
											500 ml
											1000 ml
											180 ml, 500 ml
■											750 ml, 1000 ml
■											1000 ml
■											1000 ml
	■	■		■	■	■				■	5000 ml
	■	■	■	■	■	■	■	■		■	200 ml
	■	■	■	■	■	■	■	■			500 ml, 5000 ml



# ACCESSORI PER L'USO



## Vaschetta di disinfezione 1,25l

Codici d'ordine 121000003

## Contenitore di disinfezione delle frese 200ml

Codici d'ordine 121000002

## META TOUCH

Codici d'ordine 121000018



## META TOUCHLESS

Codici d'ordine 121000019

## Rubinetto per tanica 5l

Codici d'ordine 121000001



## GREEN&CLEAN WK indicatori perossido

Codici d'ordine 121000015 - WK indicatori, 25 pezzi

Codici d'ordine 121000016 - WK indicatori, 5 pezzi

## Kit dosaggio per bottiglie riunito

Codici d'ordine 121000014