

GREEN&CLEAN

Désinfection



Surfaces | Domaines spécifiques
Instruments | Accessoires pour l'utilisation

GREEN&CLEAN IK

Désinfection des canaux d'eau et d'air de pulvérisation de turbines, pièces à main et contre-angles

GREEN&CLEAN WD

Désinfectant de surface à base d'alcool pour les petites surfaces, comme celles des pièces à main et des contre-angles

GREEN&CLEAN WK | GREEN&CLEAN BR


GREEN&CLEAN WK - solution pour la décontamination et la protection contre les dépôts calcaires dans les conduites d'eau

GREEN&CLEAN BR - élimination du biofilm

GREEN&CLEAN M2 | GREEN&CLEAN CL N

GREEN&CLEAN M2 - nettoyage, désinfection et désodorisation des systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame

GREEN&CLEAN CL N - nettoyage des systèmes d'aspiration

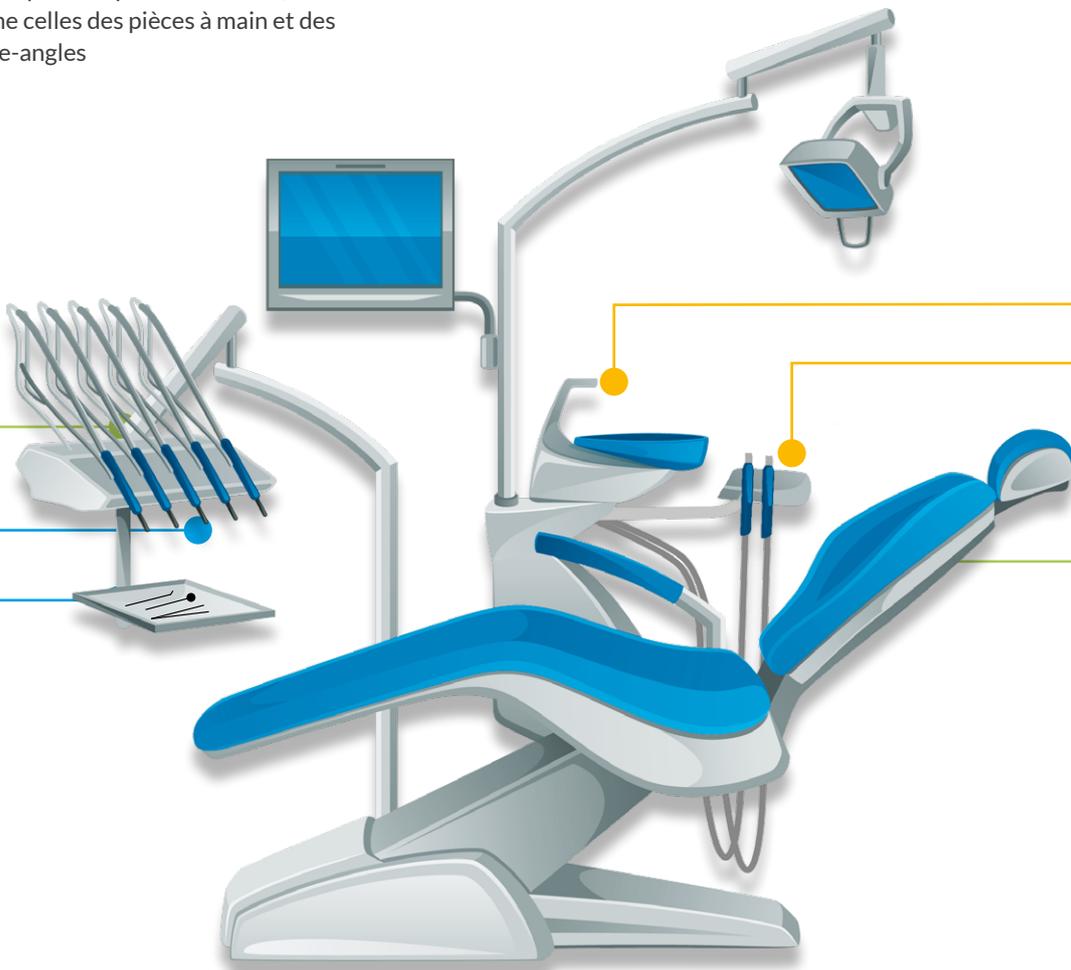

GREEN&CLEAN ID N

Pré-nettoyage désinfectant d'instruments invasifs et non-invasifs

GREEN&CLEAN MB | GREEN&CLEAN AD

GREEN&CLEAN MB - nettoyant de crachoir

GREEN&CLEAN AD - désinfection des empreintes

GREEN&CLEAN SK | GREEN&CLEAN MK

Désinfection des surfaces sans alcool pour les surfaces sensibles à l'alcool

GREEN&CLEAN SD | GREEN&CLEAN MT

Désinfection alcoolique pour surfaces résistantes à l'alcool

Les microorganismes font partie de notre vie quotidienne. Le risque d'infection n'est généralement pas considéré comme particulièrement élevé. Cependant, dans les cabinets médicaux, ce risque est beaucoup plus élevé. Le changement constant des patients et la nature du travail exigent une hygiène rigoureuse. La responsabilité du médecin envers son personnel, ses patients et lui-même, fait appel à utiliser des produits d'hygiène et de désinfection très efficaces.

Avec les produits GREEN&CLEAN, METASYS répond à toutes les exigences et directives en matière d'hygiène. Grâce à des substances actives et de soin avancées, ils assurent une sécurité et une protection absolues contre les infections. Avec GREEN&CLEAN, vous garantissez une hygiène optimale dans tous les domaines de votre cabinet dentaire!



Surfaces

GREEN&CLEAN SK	Désinfection en spray sans alcool	5
GREEN&CLEAN MK	Désinfection par essuyage sans alcool	5
GREEN&CLEAN SD	Désinfection par pulvérisation à l'alcool	6
GREEN&CLEAN MT	Désinfection par essuyage à l'alcool	6
GREEN&CLEAN WD	Désinfection par essuyage à l'alcool	7

Domaines spécifiques

GREEN&CLEAN M2	Désinfection des systèmes d'aspiration	8
GREEN&CLEAN CL N	Nettoyage des systèmes d'aspiration	10
GREEN&CLEAN AD	Désinfection des empreintes	12
GREEN&CLEAN MB	Nettoyant du crachoir	14
GREEN&CLEAN WK	Décontamination de l'eau	16
GREEN&CLEAN H1	Nettoyant pour H1 Hygiene System	18
GREEN&CLEAN BR	Élimination du biofilm	18
METASAN® P	Décontamination de l'eau	18

Instruments

GREEN&CLEAN IK	Désinfection des pièces à main et des contre-angles	19
GREEN&CLEAN ID N	Pré-nettoyage désinfectant des instruments	20

Aperçu des produits

Descriptions des produits et contenants disponibles	22
---	----

Accessoires pour l'utilisation

Bacs de désinfection	24
Systèmes de distribution	24
Robinet de vidange pour bidons	24
Bâtonnets de test	24
Aides au dosage	24

SURFACES

DÉSINFECTION DES SURFACES

Après chaque traitement, les surfaces contaminées par contact ou par aérosol à proximité du patient doivent être nettoyées et désinfectées. En cas d'aérosol, il convient de tenir compte d'un rayon de deux mètres. Toutes les zones éloignées du patient et visiblement contaminées, doivent être immédiatement désinfectées.

Tous les jours, les autres zones fonctionnelles du cabinet doivent être traitées avec un désinfectant de surface. Pour des raisons de sécurité au travail, il est généralement préférable d'utiliser des lingettes pour la désinfection plutôt que de pulvériser le produit.



**GREEN
&CLEAN SK**

DÉSINFECTION PAR PULVÉRISATION POUR GRANDES SURFACES

Désinfection par pulvérisation sans alcool pour les surfaces sensibles à l'alcool des dispositifs médicaux

- > Sans alcool
- > Temps d'action court
- > Solution désinfectante prête à l'emploi
- > Convient en particulier aux surfaces sensibles à l'alcool des dispositifs médicaux
- > Sans aldéhydes, sans phénols, sans phosphates
- > DM classe IIa, CE 0044


Combinaison moderne d'agents actifs

Alliages d'ammonium quaternaire

Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action
Bactéricide	EN 13727	charge réduite	1 min
Levuricide	EN 13624	charge réduite	1 min
Test sur 4 champs (bactéricide, levuricide)	EN 16615	charge réduite	5 min
Virucide à spectre limité	EN 14476 EN 16777	charge réduite	1 min

Numéros de commande GREEN&CLEAN SK

- 122000064 1 flacon pulvérisateur 750 ml avec tête moussante
- 122000050 6 flacons pulvérisateur 750 ml + 2 têtes moussantes
- 122000051 1 bidon 5 l
- 121000001 Robinet pour bidon 5 l

**GREEN
&CLEAN MK**

DÉSINFECTION PAR ESSUYAGE POUR GRANDES SURFACES

Lingettes pour la désinfection par essuyage sans alcool pour surfaces sensibles à l'alcool des dispositifs médicaux

- > Lingettes extra-larges (290 x 270 mm), à utiliser avec le GREEN&CLEAN SK, pour la désinfection par essuyage de grandes surfaces des dispositifs médicaux

Numéros de commande GREEN&CLEAN MK

- 122000040 1 boîte distributrice de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes
1 bidon 5 l de GREEN&CLEAN SK
- 122000042 2 rouleaux de 70 lingettes
- 122000043 1 boîte distributrice de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes
- 122000076 6 rouleaux de 70 lingettes



GREEN
& CLEAN

SD

DÉSINFECTION PAR PULVÉRISATION POUR GRANDES SURFACES

Désinfection alcoolique par pulvérisation pour surfaces résistantes à l'alcool des dispositifs médicaux

- > Temps d'action court
- > Solution désinfectante prête à l'emploi
- > Sans formaldéhyde
- > DM classe IIa, CE 0044

Combinaison moderne d'agents actifs

Éthanol, 2-propanol, alliages d'ammonium quaternaire, glyoxale



Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	15 s
Levuricide	EN 13624	charge élevée	15 s
Tuberculocide	EN 14348	charge élevée	1 min
Test sur 4 champs (bactéricide, levuricide)	EN 16615	charge élevée	1 min
Virucide à spectre limité	EN 14476 EN 16777	charge réduite	1 min

Numéros de commande GREEN&CLEAN SD

- 122000047 5 bouteilles de 750 ml + 2 pulvérisateurs
- 122000045 6 bouteilles de 750 ml
- 122000048 1 bidon 5 l
- 122000046 2 bouteilles de 750 ml + 1 pulvérisateur
- 121000001 Robinet pour bidon 5 l

GREEN
& CLEAN

MT

DÉSINFECTION PAR ESSUYAGE POUR GRANDES SURFACES

Désinfection alcoolique par essuyage pour surfaces sensibles à l'alcool des dispositifs médicaux

- > Lingettes extra-larges (290 x 270 mm), à utiliser avec le GREEN&CLEAN SD, pour la désinfection par essuyage de grandes surfaces des dispositifs médicaux

Numéros de commande GREEN&CLEAN MT

- 122000044 1 boîte distributrice de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes
1 bidon 5 l de GREEN&CLEAN SD
- 122000042 2 rouleaux de 70 lingettes
- 122000043 1 boîte distributrice de 70 lingettes + 5 rouleaux de 70 lingettes
- 122000076 6 rouleaux de 70 lingettes





DÉSINFECTION PAR ESSUYAGE POUR PETITES SURFACE

Lingettes désinfectantes à base d'alcool d'un tissu résistant pour la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux (p. ex. surfaces extérieures des pièces à main et contre-angles)

- > Temps d'action court
- > Sans formaldéhyde
- > Avec scellement de sécurité hygiénique
- > DM classe IIa, CE 0044

Combinaison moderne d'agents actifs

Éthanol, 2-propanol, alliages d'ammonium quaternaire, glyoxale



Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	30 s
Levuricide	EN 13624	charge élevée	30 s
Tuberculocide	EN 14348	charge élevée	30 s
Test sur 4 champs (bactéricide, levuricide)	EN 16615	charge élevée	1 min
Virucide à spectre limité	EN 14476 EN 16777	charge élevée	30 s

Numéros de commande

- 122000052 1 boîte de 120 lingettes
- 122000053 1 boîte de 120 lingettes + 3 sachets de 120 lingettes
- 122000055 6 sachets de 120 lingettes
- 121000012 Boîte vide GREEN&CLEAN WD



DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
& CLEAN

M2

DÉSINFECTION DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

Concentré à double action antimousse pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des systèmes d'aspiration et récupérateurs d'amalgame

- > Système dual (rouge/vert)
- > Excellent effet anti-mousse actif
- > Manipulation simple grâce au doseur pratique
- > Produit enzymatique avec excellente solubilité de protéines
- > Produit idéal pour tous les séparateurs d'amalgame et séparateurs air/eau
- > DM classe IIa, CE 0044



Combinaison moderne d'agents actifs

Alkylamine, alliages d'ammonium quaternaire, enzymes

GREEN&CLEAN M2 vert Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action	solution
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	10 min	solution à 1%
Levuricide	EN 13624	charge élevée	10 min	solution à 1%
Tuberculocide	EN 14348	charge élevée	240 min	solution à 1%
Essai porte germe - bactericide	EN 14561	charge élevée	15 min	solution à 1%
Essai porte germe - levuricide	EN 14562	charge élevée	15 min	solution à 1%
Virucide à spectre limité	EN 14476	charge élevée	60 min	solution à 1%

GREEN&CLEAN M2 rouge Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action	solution
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	10 min	solution à 1%
Levuricide	EN 13624	charge élevée	10 min	solution à 1%
Tuberculocide	EN 14348	charge élevée	240 min	solution à 1%
Essai porte germe - bactericide	EN 14561	charge élevée	15 min	solution à 1%
Essai porte germe - levuricide	EN 14562	charge élevée	15 min	solution à 1%
Virucide à spectre limité	EN 14476	charge élevée	60 min	solution à 1%

Numéros de commande

- 122000026 2 flacons de 500 ml
(1 flacon rouge, 1 flacon vert)
+ doseur
- 122000027 4 flacons de 500 ml
(2 flacons rouge, 2 flacons vert)
- 122000028 2 flacons de 500 ml
(1 flacon rouge, 1 flacon vert)
- 122000031 GREEN&CLEAN M2 rouge,
25 x flacons de 500 ml
- 122000030 GREEN&CLEAN M2 vert,
25 x flacons de 500 ml
- 121000009 Doseur GREEN&CLEAN M2



DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'ASPIRATION

**SIMPLE À
EXPLIQUER !**

**GREEN
& CLEAN**

M2

1

Appuyer deux fois sur la pompe doseuse (= 6 ml de concentré).



2

Remplir le bac mélangeur avec de l'eau froide jusqu'au tiret (= 600 ml solution à 1%).



3

Positionner la petite canule sur le petit orifice n°1 jusqu'à entendre un bruit d'air (200 ml).



4

Positionner la grosse canule sur le grand orifice n°2 jusqu'à entendre un bruit d'air (200 ml).



5

Verser la solution restante dans le crachoir (200 ml).



6

Laisser agir (HBV/HIV/HCV: 60 mn, tuberculocide: 240 mn), puis rincer.



i

- 2 fois/jour (midi et soir) et après toute intervention chirurgicale
- Aspirer de l'eau froide après tout traitement
- Alternier les couleurs au terme des 83 utilisations (= 1 bouteille)
- Porter des gants de protection
- Respecter le dosage et temps d'action
- Une fois préparée, la solution est à utiliser immédiatement
- Respecter les indications du fabricant

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
& CLEAN

CLN

NETTOYAGE DES SYSTÈMES D'ASPIRATION

Concentré pour le nettoyage quotidien des systèmes d'aspiration

- > Meilleur anti-mousse grâce à une combinaison moderne de substances actives
- > Excellent pouvoir de dissolution des protéines grâce à un mélange spécial d'enzymes
- > Parfum agréable dans les salles de soin
- > Dosage facile grâce à la bouteille à double goulot
- > Solution d'utilisation pH neutre
- > DM classe I, CE



Combinaison moderne d'agents actifs

Acide alkyléthercarboxylique, subtilisine

Numéros de commande

12200004 2 bouteilles de 1000 ml

12100005 Doseur GREEN&CLEAN CLN



DÉSINFECTION DU SYSTÈME D'ASPIRATION

**SIMPLE À
EXPLIQUER !**

**GREEN
&CLEAN**

CLN

1

Ouvrir le bouchon du réservoir de dosage placé en haut du flacon.



2

Remplir le récipient d'eau froide jusqu'au repère (= 600 ml de solution à 1,6%).



3

Tenir un petit tuyau d'aspiration sur l'ouverture n° 1 jusqu'à ce que de l'air soit aspiré (200 ml).



4

Tenir un grand tuyau d'aspiration sur l'ouverture n° 2 jusqu'à ce que de l'air soit aspiré (200 ml).



5

Vider le reste de la solution dans le crachoir (200 ml). Ne pas rincer!



6

Attendre le temps d'action (60 min) puis rincer à l'eau froide.



i

- Laisser agir le GREEN&CLEAN CLN pendant la nuit et le week-end. Si nécessaire, notamment en cas d'encrassement important, nous vous recommandons d'effectuer une désinfection supplémentaire à midi.
- Une fois préparée, la solution doit être utilisée immédiatement.
- Aspirer de l'eau froide après tout traitement.
- Porter des gants de protection!
- Respecter scrupuleusement les instructions de dosage et les délais d'action recommandés!
- Respecter les indications du fabricant!

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
&CLEAN

AD

DÉSINFECTION DES EMPREINTES

Solution prête à l'emploi pour la désinfection par immersion des prothèses dentaires, des prothèses dentaires portées et des empreintes dentaires

- > Temps d'action court
- > Utilisable pour les alginates, le silicone, le polyéther et le polysulfide
- > Très grande compatibilité avec les matériaux
- > Sans formaldéhyde ni phénol
- > Durée de conservation: 7 jours
- > DM classe IIa, CE 0044

Combinaison moderne d'agents actifs

Alliages d'ammonium quaternaire, alkylamine, tensioactifs



Substance active	Germe d'essai	Standard	Informations de test	Temps d'action
Bactéricide	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 13727	charge élevée ¹	2 min
Levuricide	C. albicans	EN 13624	charge élevée ¹	2 min
Essai porte germe - bactericide	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa	EN 14561	charge élevée ¹	5 min
Essai porte germe - levuricide	C. albicans	EN 14562	charge élevée ¹	5 min
Virucide à spectre limité	Vacciniavirus	EN 14476	charge réduite ²	15 sec
		EN 16777	charge réduite ²	1 min

¹ Albumine bovine 3g/l + erythrocytes ovines 3ml/l

² Albumine bovine 0.3g/l

Numéros de commande

- 122000001 1 bidon 5 l
- 121000003 Bac de désinfection 1.25 l avec couvercle et égouttoir
- 121000001 Robinet pour bidon 5 l



DÉSINFECTION DES EMPREINTES

**SIMPLE À
EXPLIQUER !**

**GREEN
& CLEAN**

AD

1

Verser GREEN&CLEAN AD dans un bac approprié (pas trop grand).



2

Rincer abondamment à l'eau toute contamination visible.



3

Immerger l'empreinte complètement et sans bulles dans la solution désinfectante.



4

Attendre le temps d'action. Rincez ensuite soigneusement l'empreinte à l'eau.



i

- Si la prothèse est réintroduite dans la bouche du patient, une nouvelle solution désinfectante doit être utilisée !
- Effectuez un rinçage buccal hygiénique sur le patient avant de prendre l'empreinte.
- Respectez les instructions des deux fabricants (matériau d'empreinte et désinfectant) en ce qui concerne le temps d'exposition et la compatibilité des matériaux.
- Utilisez un porte-empreinte approprié pour la désinfection de l'empreinte : les porte-empreintes ont souvent une grande capacité et consomment donc de grandes quantités de désinfectant.
- Le temps d'exposition ne doit pas dépasser 5 minutes (stabilité de la forme) !
- Convenez d'un accord écrit avec le laboratoire pour éviter une double désinfection.
- Portez des gants de protection !
- Respectez les instructions du fabricant !

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
& CLEAN

MB

NETTOYANT DE CRACHOIR

Nettoyant pour brosses à base d'acide citrique et d'enzymes pour le nettoyage du crachoir

- > Excellent pouvoir de dissolution des protéines grâce à la présence d'enzymes
- > Avec anti-mousse spécial
- > DM classe I, CE

Combinaison moderne d'agents actifs

Alliages d'ammonium quaternaire, tensioactifs, enzymes

Numéros de commande

122000035	Flacon doseur de 180 ml, avec brosse
122000032	2 flacons de 500 ml + 2 flacons doseur vides + 2 brosses
122000033	4 flacons de 500 ml + 4 brosses
122000034	4 flacons de 500 ml
122000037	4 brosses
122000036	Flacon doseur avec brosse, vide



NETTOYAGE

DU CRACHOIR

**SIMPLE À
EXPLIQUER !**

**GREEN
& CLEAN**

MB

1

Remplir la solution de nettoyage dans le flacon distributeur.



2

Visser la tête de brosse avec le dispositif de dosage sur le flacon distributeur.



3

Retourner le flacon pour doser la solution de nettoyage (appuyer 1 fois).



4

Mouiller le crachoir avec la brosse.



5

En cas de salissures importantes, actionner le rinçage du bol spécial.



6

Nettoyer et désinfecter régulièrement le flacon distributeur et la tête de la brosse.



i

- Utiliser GREEN&CLEAN MB non dilué !
- Désinfecter régulièrement la tête de brosse dans un bain à ultrasons ou un bain d'instruments (ne pas passer à l'autoclave !)
- Remplacer régulièrement les têtes de brosse !
- Porter un équipement de protection personnel pendant l'utilisation !
- Respecter les indications du fabricant !

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
& CLEAN

WK

DÉCONTAMINATION DE L'EAU

Solution à 2% à base de peroxyde d'hydrogène pour la décontamination et la protection contre les dépôts calcaires dans les conduits d'eau des cabinets dentaires

- > Large spectre d'action
- > Convient également pour les systèmes bouteilles
- > Préviend les dépôts calcaires
- > DM classe IIa, CE 0044

Substance active

Peroxyde d'hydrogène

GREEN&CLEAN WK bandelettes d'analyse

- > Pour effectuer une inspection visuelle de la fonctionnalité et de l'efficacité du système de décontamination d'eau
- > La couleur de la bandelette indique le niveau de concentration du désinfectant GREEN&CLEAN WK dans l'eau

Doseur pour systèmes bouteilles

- > S'utilise pour le GREEN&CLEAN WK 750 ml

Numéros de commande

122000057 4 bouteilles de 750 ml

122000056 6 bouteilles de 1000 ml

121000015 WK bandelettes d'analyse, 25 pces.

121000016 WK bandelettes d'analyse, 5 pces.

121000014 Doseur pour systèmes bouteilles
(pour bouteille de 750 ml)



UTILISATION DU AIDE AU DOSAGE

**SIMPLE À
EXPLIQUER !**

**GREEN
& CLEAN** **WK**

1 Porter des gants lors du retrait de l'emballage.



2 Retirer la bande de garantie (éviter tout contact de la peau avec le tube plongeur).



3 Fixer fermement l'embout de dosage (avec le tube de montée) sur le flacon GREEN&CLEAN WK.



4 Pour le dosage, ouvrir le couvercle et appuyer légèrement sur le flacon.



5 Verser GREEN&CLEAN WK dans le flacon et le fixer à l'unité de traitement.



6 Refermer immédiatement après chaque utilisation afin de protéger le contenu de toute contamination.



i

- Pour une décontamination continue, il faut ajouter à nouveau du GREEN&CLEAN WK à chaque remplissage du flacon.
- Lorsque le contenu du flacon de GREEN&CLEAN WK est épuisé, retirer le doseur du flacon vide et le placer directement sur le nouveau flacon.
- Le doseur ne convient pas pour le retraitement!

- Le doseur doit être remplacé tous les 6 mois et en cas de fort encrassement.
- Porter des gants et des lunettes de protection !

* Le doseur ne convient que pour les flacons GREEN&CLEAN WK de 750 ml. Pour les bouteilles de 1 litre, il faut utiliser un gobelet doseur.

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN
& CLEAN

H1

NETTOYANT POUR LE H1 HYGIENE SYSTEM

Concentré de décontamination pour le H1 Hygiene System de METASYS

- > Pour le nettoyage en continu de l'ensemble système d'aspiration
- > Effet anti-mousse actif
- > DM classe I, CE

Combinaison moderne d'agents actifs

Alliages d'ammonium quaternaire, d'agents spéciaux tensio-actifs, enzymes

Numéro de commande

122000005 4 sachets de 500 ml



GREEN
& CLEAN

BR

ÉLIMINATION DU BIOFILM

Solution à 4 % à base de peroxyde d'hydrogène pour l'enlèvement du biofilm des conduits d'eau de l'unité de traitement avec le BR System ou les systèmes Bottle

- > Efficace dans l'élimination du biofilm en seulement 30 minutes
- > Recommandé pour une remise en état des unités dentaires ou avant l'installation d'un système de décontamination d'eau
- > Utilisation simple grâce à une solution colorée
- > DM classe IIa, CE 0044

Substance active

Hydrogène peroxyde

Numéro de commande

122000002 2 bouteilles de 1000 ml



METASAN®

P

DÉCONTAMINATION DE L'EAU

Solution à 1,41% à base de peroxyde d'hydrogène pour la désinfection de l'eau de traitement dans les unités de traitement dentaires

- > Convient aux unités de traitement Dentsply Sirona
- > Large spectre d'action
- > DM classe IIa, CE 0044

Substance active

Péroxyde d'hydrogène

Numéros de commande

122000059 6 bouteilles de 1000 ml



Spray désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcool pour les conduits d'air et d'eau des turbines et contre-angles


- > Temps d'action court
- > Sécurité d'utilisation accrue grâce aux adaptateurs sertis
- > Un flacon spray suffit pour env. 300 applications d'env. 2 secondes de durée de pulvérisation
- > Un adaptateur universel pour tous les couplages des pièces à main, contre-angles et turbines et des adaptateurs spécifiques pour les turbines des principaux fabricant
- > Ne remplace pas la lubrification recommandée par le fabricant
- > DM classe IIa, CE 0044



Combinaison moderne d'agents actifs

1-propanol, 2-propanol, 2-butanol, alliages d'ammonium quaternaire

Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	1 min
Levuricide	EN 13624	charge élevée	1 min
Levuricide	EN 14348	charge élevée	1 min
Essai porte germe - bactericide	EN 14561	charge élevée	2 min
Essai porte germe - levuricide	EN 14562	charge élevée	1 min
Essai porte germe - tuberculocide	EN14563	charge élevée	1 min
Virucide à spectre limité	EN 14476 EN 16777	charge élevée	30 s

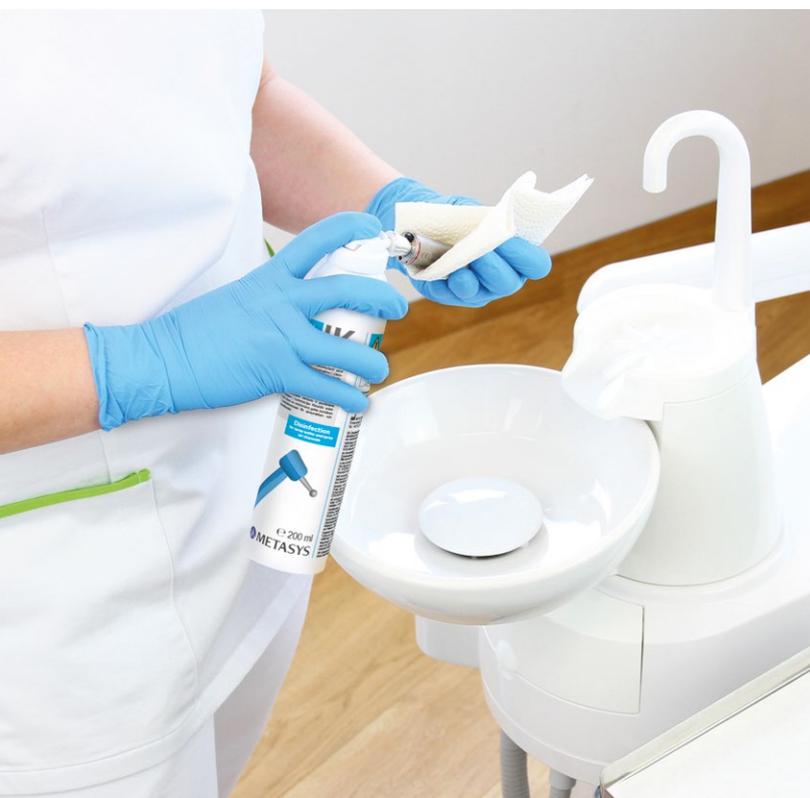

Numéros de commande

2 atomiseurs de 200 ml avec adaptateur sertis

- 122000017 Couplages pièces à main et contre-angles (universel)
- 122000025 Couplage turbine W&H
- 122000021 Couplage turbine Bien Air
- 122000023 Couplage turbine KaVo
- 122000024 Couplage turbine Dentsply Sirona
- 122000022 Couplage turbine Castellini
- 122000018 Couplage turbine NSK
- 122000020 Couplages pièces à main et contre-angles Dentsply Sirona T1 Classic
- 122000019 Couplage turbine NSK Quick

GREEN & CLEAN ID N

DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS

Concentré très efficace pour le pré-nettoyage de désinfection d'instruments invasifs et non invasifs

- > 5 l de concentré donnent jusqu'à 500 l de solution d'utilisation à 1 %
- > Sans aldéhyde ni phénol
- > Durée de conservation: 14 days
- > DM classe IIa, CE 0044



Combinaison moderne d'agents actifs

Alliages d'ammoniums quaternaires, alkylamin, inhibiteur de corrosion

Spectre d'action	Standard	Informations de test	Temps d'action	Solution
Bactéricide	EN 13727	charge élevée	5 min	Solution à 2%
Levuricide	EN 13624	charge élevée	5 min	Solution à 1%
Tuberculocide	EN 14348	charge élevée	60 min	Solution à 1%
Essai porte germe - bactericide	EN 14561	charge élevée	15 min	Solution à 1%
Essai porte germe - levuricide	EN 14562	charge élevée	15 min	Solution à 1%
Essai porte germe - tuberculocide	EN 14563	charge élevée	60 min	Solution à 0.5%
Virucide à spectre limité	EN 14476	charge réduite	15 min	Solution à 0.5%

Numéros de commande

- 122000015 4 bouteilles de 500 ml + doseur
- 122000016 1 bidon 5 l
- 121000007 Doseur pour GREEN&CLEAN ID N
- 121000001 Robinet pour bidon 5 l



PRÉ-NETTOYAGE DÉSINFECTANT DES INSTRUMENTS

SIMPLE À EXPLIQUER !

GREEN & CLEAN

ID N

1

Doser le concentré. Remplir le bac d'eau froide et ajouter le concentré.



2

Noter la date à laquelle la solution a été mélangée.



3

Enlever les grosses impuretés des instruments.



4

Immerger complètement les instruments dans la solution en évitant les bulles.



5

Couvrir le bac et attendre le temps d'action.



6

Rincer soigneusement les instruments à l'eau.



i

- Le temps d'action commence après l'introduction du dernier instrument.
- Enlever les salissures grossières des instruments et les démonter si nécessaire.
- Attention aux objets pointus et tranchants !
- Porter des gants de protection!
- Préparer la solution uniquement avec de l'eau froide
- Respecter scrupuleusement le dosage et le temps d'action !
- Respecter les indications du fabricant de l'instrument !

APERÇU DES PRODUITS

Produit	Application	Caractéristiques			
		Nettoyage	Désinfection	Alcoolique	Prêt à l'emploi

SURFACES

GREEN&CLEAN SK	Désinfection par pulvérisation	■	■		■
GREEN&CLEAN MK	Désinfection par essuyage	■	■		
GREEN&CLEAN WD	Désinfection par essuyage	■	■	■	■
GREEN&CLEAN SD	Désinfection par pulvérisation	■	■	■	■
GREEN&CLEAN MT	Désinfection par essuyage	■	■	■	

DOMAINES SPÉCIFIQUES

GREEN&CLEAN M2 vert	Désinfection des systèmes d'aspiration	■	■		
GREEN&CLEAN M2 rouge	Désinfection des systèmes d'aspiration	■	■		
GREEN&CLEAN H1	Nettoyant pour H1 Hygiene System	■			■
GREEN&CLEAN CL N	Nettoyage des systèmes d'aspiration	■			
GREEN&CLEAN MB	Nettoyant du crachoir	■			■
GREEN&CLEAN WK	Décontamination de l'eau		■		
METASAN® P	Décontamination de l'eau		■		■
GREEN&CLEAN BR	Élimination du biofilm	■	■		■
GREEN&CLEAN AD	Désinfection des empreintes	■	■		■

INSTRUMENTS

GREEN&CLEAN IK	Désinfection des pièces à main, contre-angles et turbines	■	■	■	■
GREEN&CLEAN ID N	Désinfection des instruments	■	■		

Produits non remboursés par les organismes de santé. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les notices de nos produits

Testé selon les normes EN suivantes										Conteneurs
EN 13623	EN 13624	EN 13727	EN 14348	EN 14476	EN 14561	EN 14562	EN 14563	EN 16615	EN 16777	Disponible comme

	■	■		■				■	■	750 ml, 5000 ml
										70 lingettes
	■	■	■	■				■	■	120 lingettes
	■	■	■	■				■	■	750 ml, 5000 ml
										70 lingettes

	■	■	■	■	■	■				500 ml
	■	■	■	■	■	■				500 ml
										500 ml
										1000 ml
										180 ml, 500 ml
■										750 ml, 1000 ml
■										1000 ml
■										1000 ml
	■	■		■	■	■			■	5000 ml

	■	■	■	■	■	■	■		■	200 ml
	■	■	■	■	■	■	■			500 ml, 5000 ml

ACCESSOIRES POUR L'UTILISATION



Bac de désinfection 1.25 l

N° de commande 121000003

Bac de désinfection 200 ml pour fraises

N° de commande 121000002

META TOUCH

N° de commande 121000018

META TOUCHLESS

N° de commande 121000019

Robinet pour bidon 5 l

N° de commande 121000001

GREEN&CLEAN WK bandelettes d'analyse

N° de commande 121000015 - WK bandelettes d'analyse, 25 pces.
(pour 6 mois)

N° de commande 121000016 - WK bandelettes d'analyse, 5 pces.

Doseur pour systèmes bouteilles

N° de commande 121000014



Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation. Les produits sont non remboursables par les organismes d'assurance maladie.

 **METASYS**
protect what you need

METASYS Medizintechnik GmbH

METASYS logistics & collection GmbH

METASYS recycling & processing GmbH

Florianstraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
T +43 512 205420 312

www.metasys.com | info@metasys.com

